


Ladeanleitung - Accuject™ Dual


LuxSmart (Toric) | SKU: YSMARTD, YSMARTTD

LuxLife (Toric) | SKU: YLIFE, YLIFET

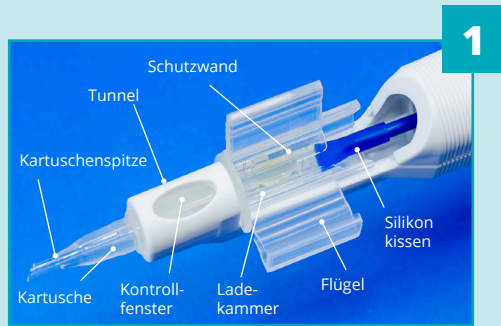

Accuject™ Dual ist ein vollständig vorgeladenes Einweg-Injektionsystem. IOL, BSS* und Viskoelastikum** sollten vor dem Eingriff mindestens 30 Minuten lang bei mindestens 20°C gelagert werden.

Öffnen Sie nicht den Fingerflansch und drehen Sie nicht den Kolben, bis Sie zur Implantation dazu aufgefordert werden.

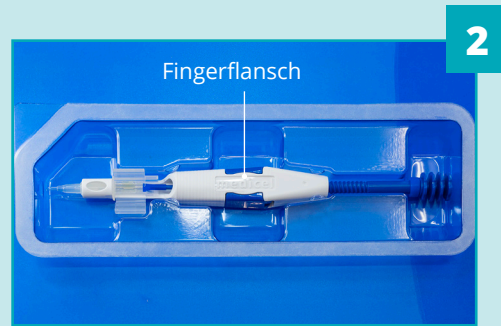


Öffnen Sie den Blister und legen Sie den Injektor auf eine sterile Fläche.



Spülen Sie die Linse durch langsames Injizieren von BSS* (Raumtemperatur, nicht direkt aus dem Kühlschrank) durch die nach oben geneigte Kartuschenspitze.



Spülen Sie dann die Linse von der Rückseite der Ladekammer indem Sie BSS unter die Schutzwand in der Nähe des Silikonkissens injizieren. Die Kartusche enthält eine Beschichtung, die durch Zugabe von BSS* aktiviert wird. Sie fixiert eine Flüssigkeitsschicht, die für Geschmeidigkeit sorgt. Die vollständige Hydratation aller Bereiche ist notwendig.

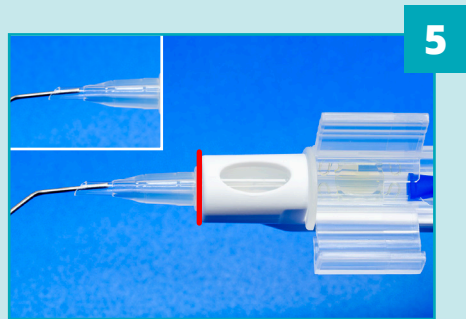

Füllen Sie das Viskoelastikum** bis zur roten Linie in die Kartuschenspitze.




30 Sekunden warten.



Schließen Sie die Kartuschenflügel, bis Sie ein „Klicken“ hören. Drücken Sie den Kolben vor bis zum Anschlag. Die Linse sowie die Hälfte des Silikonkissens sind nun im Kontrollfenster zu sehen. Die Linse ist nun geladen und bereit für die Implantation.



VOR DER IMPLANTATION

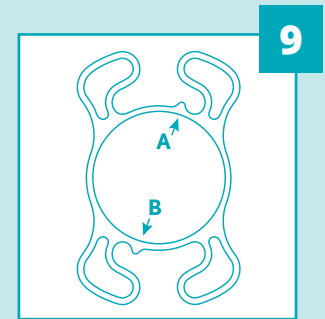

Nach der Implantation müssen die Orientierungen der Linse oben rechts (A) und unten links (B) ausgerichtet sein.

*BSS: Balanced Salt Solution **Amvisc® Plus, OcuCoat® and EyeFill® C.

Ladeanleitung - Accuject™ Dual

LuxSmart (Toric) | SKU: YSMARTD, YSMARTTD

LuxLife (Toric) | SKU: YLIFE, YLIFET

Der Injektor ist nun bereit für die Implantation und die bevorzugte Implantations-Methode kann gewählt werden.

DREHEN:



Den Fingerflansch für diese Methode vollständig eingeklappt lassen.

Den Drehknopf langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die Linse vollständig freigegeben ist.

DRÜCKEN:



Klappen Sie den Fingerflansch aus.

Langsam Druck auf den Kolben ausüben, bis die Linse vollständig freigegeben ist.

Hinweis: Anders als bei einem Injektor mit starrem Kolben ist es erforderlich, das Drehen/ Drücken unmittelbar zu stoppen, sobald die Linse vollständig freigegeben ist, um ein Festsetzen des Silikonkissens in der Inzision (Pilzeffekt) zu vermeiden.

© 2025 Bausch + Lomb Incorporated. All rights reserved. ®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
All other brand/product names are trademarks of the respective owners. For healthcare professionals only, please refer to the instructions for use.
LUXLIFE_INT_LoadingGuide_022025_00

LUXSMART™

LUXlife™

BAUSCH + LOMB