


Preloaded System Accuject™ Pro




Ladeanleitung für den Preloaded IOL Injektor Accuject™ Pro mit LuxSmart™, LuxSmart™ Crystal, LuxGood™ und LuxGood Crystal™



1

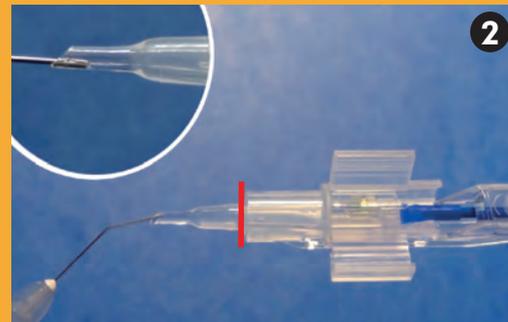

2

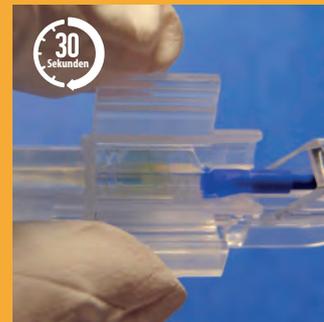

30
Sekunden



3



4

„klick“

Aktivieren Sie das Coating, indem Sie langsam BSS* (bei Raumtemperatur, nicht direkt aus dem Kühlschrank) von der nach oben geneigten Kartuschenspitze aus injizieren.


Geben Sie die viskoelastische Lösung** in die Spitze der Kartusche, bis die rote Linie erreicht ist.

Bitte mindestens 30 Sekunden einwirken lassen.

Geben Sie einen kleinen Tropfen Visko auf den Stempel.

Schließen Sie die Flügel der Ladekammer, bis Sie ein "Klicken" hören. Das System ist nun bereit für die Injektion (schieben Sie die Linse noch nicht in den Tunnel); jetzt ist der Moment gekommen, das System ggf. dem Chirurgen zu übergeben.

Für die Implantation:

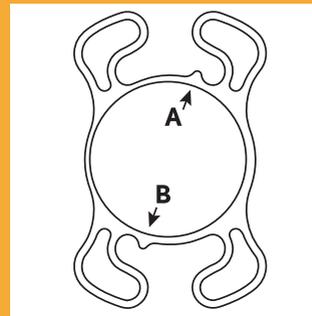

Drücken Sie den Kolben nach vorne bis die IOL in den Kartuschentunnel eintritt und ziehen sie ihn etwas zurück, wenn sich die Linse im mittleren Teil befindet.

Überprüfen Sie, dass die vorderen Haptiken nicht auf der Optik liegen. Führen Sie die Kartuschenspitze durch die Inzision ins Auge ein und drücken Sie die Linse gleichmäßig, ohne Unterbrechung, in den Kapselsack.

Sobald die IOL implantiert ist sollten sich die Orientierungen an der Optik- Außenkante oben rechts (A) und unten links (B) befinden.

Das Accuject™ Pro ist ein vollständig vorgeladenes Injektionssystem für den einmaligen Gebrauch mit Push-Funktion. Die IOL und das Viskoelastikum sollten vor dem Eingriff mindestens 30 Minuten lang bei mindestens 20 °C gelagert werden.

*BSS: Balanced Salt Solution **Amvisc® Plus, OcuCoat® und EyeFill® C.

© Bausch + Lomb Incorporated. ® /™ are trademarks of Bausch + Lomb Incorporated or its affiliates. All other brand/product names are trademarks of their respective owners. EMEA_SU_LG_LUX_20_001

DEUTSCHLAND
Bausch + Lomb GmbH
Tel.: 0800 58 93 114
Fax: 01805 90 94 90 94

ÖSTERREICH
Bausch + Lomb GmbH
Tel.: 0800 241 015
Fax: 0800 241 016

SCHWEIZ
Bausch + Lomb Swiss AG
Tel.: 0848 228 724
Fax: 0848 228 725

kundenservice@bausch.com
www.bausch-lomb.de/surgical